

F 牙钻 使用说明书

1. 适用范围

该产品供口腔科钻削牙齿用。

2. 产品描述

该产品由S42010不锈钢材料组成。

3. 规格型号

GD18, MSD, MD28, MD33, MD38, MD43, MD48, MD53, MD58, MD63, MDD, 1.6GD, GDL, GDS, MMD,DE

4. 注意事项

1) 使用前的注意事项

- a. 确认即将使用的器械是否有损坏及耗损。
- b. 确认器械表面是否有异物附着、是否干净。
- c. 确认是否已对器械进行消毒灭菌。

2) 操作中的注意事项

- a. 具有熟练经验的使用者操作使用。
- b. 器械有损伤时, 请勿使用, 禁止任意变更、修理。

3) 使用后的管理和储存

- a. 使用蒸馏水和医疗器械清洁剂清洁, 并再次使用蒸馏水冲洗。
- b. 使用清洁材料清除灰尘和杂质。
- c. 清洁后进行灭菌。
灭菌方法: 在134℃的高压蒸汽灭菌器中灭菌15min。
- d. 充分干燥, 不留水分。且应在室温下在通风、避光处保存。

4. 禁忌症

无

生产日期: 见产品标签

使用期限: 如果使用得当, 产品的使用期限没有限制。

修订日期: 2022.08.03

注册人/生产企业: InnoBioSurg Co., Ltd 伊诺生物科技有限公司
住所: 44-19, Techno 10-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea
生产地址: 44-19, Techno 10-ro, Yuseong-gu, Daejeon
电话: 82-42-933-2879
传真: 82-42-933-2881

代理人/售后服务单位: 青岛安美齿医疗器械有限公司
住所: 山东省青岛市城阳区重庆北路191号-1
电话: 0532-67731041

医疗器械注册证书编号: 国械注进20172176385
产品技术要求编号: 国械注进20172176385

Symbol	Instruction
	生产日期
	制造商
	批号
	欧洲代理人
	参考说明书
	不要重复使用
	储存条件
	有效期至

附录 规格型号表

型号	材料	是否无菌
GD18	不锈钢 (S42010)	非无菌
MSD	不锈钢 (S42010)	非无菌
MD28	不锈钢 (S42010)	非无菌
MD33	不锈钢 (S42010)	非无菌
MD38	不锈钢 (S42010)	非无菌
MD43	不锈钢 (S42010)	非无菌
MD48	不锈钢 (S42010)	非无菌
MD53	不锈钢 (S42010)	非无菌
MD58	不锈钢 (S42010)	非无菌
MD63	不锈钢 (S42010)	非无菌
MDD	不锈钢 (S42010)	非无菌
1.6GD	不锈钢 (S42010)	非无菌
GDL	不锈钢 (S42010)	非无菌
GDS	不锈钢 (S42010)	非无菌
MMD	不锈钢 (S42010)	非无菌
DE	不锈钢 (S42010)	非无菌

IBS-IFU-T-001 (Rev. 2)